

schülke -+



acryl-des® Tücher

acryl-des® ist ein alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen – erhältlich als Gebrauchslösung sowie als getränkte Desinfektionstücher.

Unser Plus

- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit
- VAH gelistet
- für alkoholempfindliche Flächen
- hochwertige Tuchqualität (100 % Polyester), 18 x 14 cm

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art, z.B.

- Inhalatoren
- Inkubatoren
- Säuglingswannen
- Monitoren
- Kabeln
- Therapieliegen
- Kunststoffauflagen
- Ultraschallköpfe
- Solarien

Anwendungshinweise

Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Zur Anwendung auf größeren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.

Speziell für Acryl-Flächen (Plexiglas) und andere empfindliche Kunststoff-Oberflächen sowie zur Wischdesinfektion für Ultraschallköpfe geeignet.

Anbruchstabilität: 3 Monate

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid <i>gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid <i>gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
BVDV	gebrauchsfertig	1 Min.
Vaccinia Virus	gebrauchsfertig	1 Min.
Norovirus	gebrauchsfertig	15 Min.
Polyoma SV40	gebrauchsfertig	1 Min.
Rotavirus	gebrauchsfertig	1 Min.



CE 0297



Produktdaten

100 g enthalten an wirksamen Bestandteilen:
0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride, 0,26 g
Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre
Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]
dimethyl-, Chloride

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	6 - 8 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
acryl-des Tücher Dose 120 ST DS	10/Karton	165702

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung mikrocid/kodan Dose	134417

Verwandte Produkte

- acryl-des[®]

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat acryl-des[®] vorliegenden
Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter
www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

Air Liquide Ein Unternehmen der Air Liquide-
HEALTHCARE Gruppe.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com