

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### Wie funktioniert der Test?

In der Schwangerschaft beginnt die sich bildende Plazenta das Hormon HCG (Human-Chorion-Gonadotropin) zu produzieren. **expect® Schwangerschaftstest** weist das Vorhandensein des Hormons auch in geringer Konzentration (25mIE/ml) im Urin nach. Daher ist **expect® Schwangerschaftstest** besonders geeignet, eine Schwangerschaft bereits ab dem Fälligkeitstag der Periode festzustellen. In Laboruntersuchungen erzielt **expect® Schwangerschaftstest** eine Genauigkeit von 99%.

**expect® Schwangerschaftstest** prüft schnell, sicher und zuverlässig, ob eine Schwangerschaft besteht. **expect® Schwangerschaftstest** kann bereits ab dem ersten Tag des Ausbleibens der Periode und zu jeder Tageszeit angewendet werden. **expect® Schwangerschaftstest** liefert Ihnen ein zuverlässiges Ergebnis bereits nach einer Minute.

Im Falle eines positiven Testergebnisses, können Sie von einer Schwangerschaft ausgehen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Facharzt und sprechen Sie mit ihm über Ihre Schwangerschaft und Ihr werdendes Kind. Ein negatives Testergebnis deutet darauf hin, dass kein HCG-Hormon im Körper vorhanden ist und die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sehr gering ist. Sollte die Periode während der folgenden 7 Tage weiterhin ausbleiben, kann es hierfür mehrere Gründe geben:

- z.B. unregelmäßige Periode
- falsch berechneter Zyklus
- Stress
- Flug- und Fernreisen
- bestehende Schwangerschaft

Für den Fall, dass die Periode auch nach 7 Tagen weiterhin ausbleibt, sollte ein weiteres Mal ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden oder ein Gynäkologe aufgesucht werden.


### Bevor Sie den Test anwenden

Lesen Sie die Beschreibung sorgfältig durch. Nehmen Sie den Test erst direkt vor Anwendung aus der Schutzverpackung. Nehmen Sie eine Uhr zur Hand, um den Test richtig anzuwenden und das Testresultat rechtzeitig abzulesen.

# expect®

SCHWANGERSCHAFTSTEST

EINFACH | SCHNELL | ZUVERLÄSSIG  
Zur Eigenanwendung

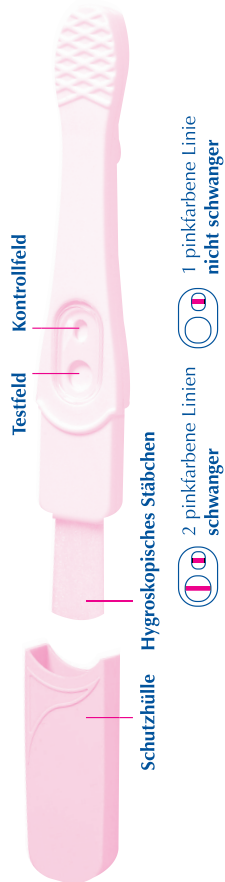

## ANWENDUNG

Nehmen Sie den **expect® Schwangerschaftstest** aus der Schutzverpackung und ziehen Sie die Schutzkappe ab. Drehen Sie den **expect® Schwangerschaftstest** so, dass der hygroskopische Teststab nach unten zeigt. Halten Sie den hygroskopischen Teststab für mindestens 6 Sekunden direkt in den Urinstrahl. Stecken Sie die Schutzkappe wieder über den hygroskopischen Teststab. Halten Sie den **expect® Schwangerschaftstest** mit der rosafarbenen Schutzkappe nach unten oder legen Sie ihn auf eine gerade Oberfläche – die Testfenster sollten nach oben zeigen.

Keinesfalls sollte der **expect® Schwangerschaftstest** mit der Schutzkappe nach oben gehalten werden, da dies das Testergebnis verfälschen kann.

Eine Minute nach Durchführung des **expect® Schwangerschaftstests** kann bereits ein positives Ergebnis (schwanger) abgelesen werden. Um sicher zu gehen, dass ein angezeigtes negatives Ergebnis (nicht schwanger) – kein Streifen im Testfenster – auch wirklich negativ ist, warten Sie fünf Minuten. Nach 10 Minuten ist das angezeigte Ergebnis nicht mehr aussagekräftig.

## ANZEIGEFENSTER

- **Kontrollfenster**  
Das kleine ovale Fenster ist das Kontrollfenster. An diesem erkennen Sie, dass der Test ordnungsgemäß funktioniert.
- **Testfenster**  
Das große runde Fenster ist das Testfenster. An diesem erkennen Sie das Testergebnis.

## AUSWERTUNG DES ERGEBNISSES

Unabhängig davon, ob Sie schwanger sind, oder nicht, erscheint nach der angegebenen Wartezeit im **Kontrollfenster ein pinkfarbener Streifen**. Dieser gibt an, dass der **expect® Schwangerschaftstest** ordnungsgemäß funktioniert hat.

Falls im Kontrollfenster kein pinkfarbener Streifen erscheint, kann es sein, dass der hygroskopische Teststab nicht ausreichend Urin absorbieren konnte oder ein anderer Fehler in der Anwendung gemacht wurde. In diesem Fall sollten Sie die Anwendungshinweise nochmals sorgfältig lesen und einen neuen **expect® Schwangerschaftstest** verwenden, um eine eventuell bestehende Schwangerschaft zu testen. Keinesfalls kann der bereits benutzte Test ein zweites Mal verwendet werden. In seltenen Fällen kann die fehlende Anzeige im Kontrollfenster von einem fehlerhaften Test herrühren.

Die Farbe der Streifen in Kontroll- und Testfenster reicht von blassrosa bis zu einem kräftigen violett. Sie ist von der Konzentration des im Urin vorhandenen Hormons HCG abhängig. Die Intensität der Farbe beeinflusst nicht das Testergebnis.

### ● Schwanger


Erscheint im Testfenster (großes rundes Fenster) ein pinkfarbener Streifen, so können Sie davon ausgehen, dass Sie schwanger sind. Dies ist auch der Fall, wenn nach 5 Minuten Wartezeit nur ein sehr blasser rosafarbener Streifen sichtbar ist.

 2 pinkfarbene Linien  
schwanger

### ● Nicht schwanger

Erscheint im Testfenster (großes rundes Fenster) nach der angegebenen Wartezeit von 5 Minuten kein Streifen, so können Sie davon ausgehen, dass Sie nicht schwanger sind.

 1 pinkfarbene Linie  
nicht schwanger

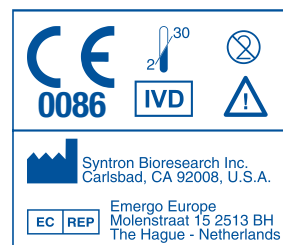

## WICHTIGE INFORMATION

- Lagerung bei Raumtemperatur
- Ausschließlich für in vitro Diagnose (nicht innerlich anwendbar)
- Nicht wiederverwendbar
- Nur bei genauer Befolgung der Gebrauchsinformation funktions-tüchtig
- Nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums verwenden
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- expect® Schwangerschaftstest** weist eine sehr hohe Genauigkeit bei der Feststellung einer eventuell bestehenden Schwangerschaft auf. Sollte der **expect® Schwangerschaftstest** ein unerwartetes oder unschlüssiges Ergebnis ausweisen, wenden Sie sich an einen Gynäkologen. Bestimmte Umstände, wie z.B. Zysten an den Eierstöcken sowie Eileiter- oder Bauchhöhlenschwangerschaften, können ein falsches Ergebnis liefern. Das Testergebnis kann außerdem direkt nach einer Geburt als fälschlicherweise positiv ausgewiesen werden.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

### 1. Wie lange ist das Testergebnis ersichtlich?

Ein positives Ergebnis bleibt meist unverändert – es kann sich jedoch die Intensität des Farbstreifens ändern. Bei einem negativen Ergebnis kann nach 10 Minuten ein blasser Farbstreifen im Testfenster erscheinen – dies bedeutet jedoch nicht, dass das Ergebnis positiv ist. Aus diesem Grund darf das Ergebnis nach 10 Minuten nicht mehr interpretiert werden.

### 2. Können Medikamente, empfängnisverhütende Präparate (Anti-Baby-Pille) oder Alkohol das Ergebnis beeinflussen?

Alkohol kann das Testergebnis nicht beeinflussen. Die Einnahme von empfängnisverhütenden Präparaten, Schmerzmitteln, Antibiotika und Hormonpräparaten sollte das Test-

ergebnis nicht beeinflussen. Nur Medikamente, die das Hormon HCG beinhalten (wie z.B. Ovitrelle, Pregnyl, Profasi, etc.) können ein falsches Ergebnis liefern.

### 3. Beeinflusst die Menge an Flüssigkeitszufuhr das Testergebnis?

Übermäßige Flüssigkeitszufuhr kann Urin verdünnen und dazu führen, dass das Vorhandensein von HCG im Urin nicht richtig dargestellt wird. Aus diesem Grund sollte die üblicherweise zugeführte Menge an Flüssigkeit nicht überschritten werden.

### 4. Was ist zu tun, wenn das Testergebnis positiv (schwanger) ist?

Ein positives Testergebnis weist auf das Vorhandensein von HCG im Urin hin und bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass Sie schwanger sind. Suchen Sie daher einen Gynäkologen auf, um wichtige Punkte für die Schwangerschaft zu besprechen.

### 5. Was ist zu tun, wenn das Testergebnis negativ (nicht schwanger) ist, ich aber trotzdem noch nicht sicher bin?

Ein negatives Testergebnis weist darauf hin, dass kein HCG im Urin gefunden wurde und bedeutet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht schwanger sind. Wenn Sie in Bezug auf die Richtigkeit des Testergebnisses unsicher sind, können Sie nach Ablauf von 7 Tagen erneut einen Schwangerschaftstest durchführen. Wenn Sie auch dann ein negatives Testergebnis erhalten und Ihre Periode nach wie vor nicht eingesetzt hat, klären Sie das Ausbleiben der Periode mit Ihre(r)m Gynäkologen/in ab. Neben einer Schwangerschaft kann es auch andere Gründe für das Ausbleiben der Periode geben.

**expect® Schwangerschaftstest** ist mit 1 Test oder 2 Tests in der Apotheke erhältlich.

Unerwartet schwanger?

Viele Fragen?

**Aktion Leben** bietet kostenlose Beratung und Hilfe!  
Telefon 01/512 52 21  
Fax 01/513-98-40  
e-mail [info@aktionleben.at](mailto:info@aktionleben.at)  
<http://www.aktionleben.at>

## Kwizda

Pharma

Kwizda Pharma GmbH,  
1160 Wien  
Erstelldatum:10/06

[www.schwangerschaftstest.at](http://www.schwangerschaftstest.at)