

PUDER 30 g

Nettofüllmenge: 30 g

PANACEO 
MED



Medizinprodukt zur lokalen Anwendung
auf der Haut bzw. im Bereich kleinerer
Wunden.

Zutaten:

PMA aktivierter
Zeolith-Klinoptilolith 30 g



Anwendungshinweise:

Bei Bedarf etwas Wundpuder
auf die Haut bzw. im Bereich
kleinerer Wunden auftragen.
Nicht öfter als 5 mal täglich
auftragen. Bis zur Abheilung
der Wunde fortsetzen.

Medizinprodukt 
Allergen-frei

Haut- und Wundpuder

**für Kinder &
Erwachsene**

- ▶ Zur **Aufsaugung
von Exsudaten**
- ▶ **Unterstützt die
Wundheilung**
- ▶ **Schützt die Wunde**



: siehe Dosenboden

LOT

: siehe Dosenboden



100179



Panaceo International Active
Mineral Production GmbH
Finkensteinerstr. 5, A-9585
Gödersdorf, Villach, Austria

100 % natürliches PMA (Panaceo-Mikro-
Aktiviertes) Vulkanmineral Zeolith-Klinoptilolith

www.panaceo.com

Hier öffnen

Medizinprodukt

Panaceo Med Haut- und Wundpuder saugt durch die mikroporöse Struktur des verwendeten kristallinen vulkanischen Minerals Exsudate im Wundbereich auf. Dadurch wird die Wunde geschützt und die Wundheilung unterstützt.

Sicherheitshinweise

- Das Medizinprodukt kann die ärztliche Versorgung nicht ersetzen.
- Im Zweifelsfall sind vor der Anwendung ein Arzt zu konsultieren und mögliche Wechselwirkungen abzuklären.
- Nicht bei offenen und klaffenden Wunden oder bei durchtrennter Dermis anwenden.
- Das Medizinprodukt darf nicht inhaliert (eingatmet) und nicht am Auge angewendet werden.
- Außer Reichweite von Kindern unter 6 Jahren aufbewahren.
- Die Dose nach der Verwendung immer schließen.
- Trocken und bei Raumtemperatur lagern.