

**Käyttöohjeet**

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

23340403 Version 1

Coloplast-logo on Coloplast A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2021-11-23

Käyttötarkoitus

Tuote on tarkoitettu kosteaan haavanhoitoon ja haavaeritteen hallintaan.

Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön sekä potilaiden käyttöön terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa.

Indikaatiot

Biatain Silicone

- on indikoitu erilaisten, sekä vähän että voimakkaasti erittävien haavojen hoitoon. Tähän sisältyvät akuutit haavat, kuten ihonotkokohtat, leikkauksen jälkeiset haavat ja traumaattiset haavat, sekä krooniset haavat, kuten säärihaavat, painehaavat ja ei-infektoituneet diabeettiset jalkahaavaumat.
- voidaan käyttää estämään leikkauksen jälkeistä rakkulointia.

Varoitukset

Kertakäyttöistä tuotetta ei saa käyttää uudelleen, sillä se voi aiheuttaa ristikontaminaation ja mahdollisesti johtaa infekttioon.

Uudelleenkäsittely, puhdistus, desinfiointi ja/tai sterilointi voivat heikentää tuotteen ominaisuuksia, mikä taas muodostaa fyysisen haitan tai infektion lisäriskin potilaalle.

Huomioitavat seikat

Terveydenhuollon ammattilaisen on tarkastettava ja hoidettava säännöllisesti paikallisia ohjeita noudattaen infektoituneet haavat, diabeteshaavat sekä haavat, jotka ovat aiheutuneet osittain tai kokonaan valtimoinsuffisienssista.

Älä käytä tuotetta hapettavien liuosten kanssa, esim. hypokloriitti- ja vetyperoksidiliuokset, koska hapettava liuos voi aiheuttaa tuotteen rappeutumista, joka voi johtaa haavan pahentumiseen. Varmista ennen tuotteen asettamista, että mahdolliset muut haihtuvat liuokset ovat kuivuneet kokonaan.

Älä leikkaa tuotteen vaahto-osaa, koska se voi aiheuttaa haavan pahentumisen haavaan jääneistä tuotejäämistä johtuen.

Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut, sillä tuotteen steriiliys saattaa olla vaarantunut, mikä voi johtaa paikalliseen infekttioon.

Suojattava suoralta auringonvalolta, koska se voi vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn ja johtaa maseraatioon.

Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia, mutta valmistuksen tai pakkaamisen aikana voi kuitenkin esiintyä harvinaista kontaminoitumista hyvin pienistä määristä luonnonkumilateksia, mikä voi mahdollisesti johtaa allergisiin reaktioihin potilailla, joilla on tunnettu tai epäilty allergia luonnonkumilateksille.

Haavasidosten käyttöön liittyviä mahdollisia sivuvaikutuksia voivat olla: ihon ärsytys/tulehdus, allerginen ihoreaktio, maseraatio, kipu, hyperrakeistus ja rakkuloiden muodostuminen.

Tietoa

Tuote on steriili, kertakäyttöinen ja polyuretaanivaahtosidos, jossa on silikonikiinnitys.

Biatain Silicone

- voidaan jättää paikalleen enintään 7 päiväksi riippuen haavaeritteen määrästä, sidoksen olosuhteista ja haavatyyppistä
- voidaan jättää paikalleen suihkussa käynnin ajaksi
- voidaan käyttää yhdessä Purilon Gelin kanssa nekroottisen kudoksen autolyyttiseen puhdistukseen
- voidaan käyttää terveydenhuoltoalan ammattilaisen valvonnassa potilaille, jotka tarvitsevat hoitoa paikalliseen tai systeemiseen infekttioon
- soveltuu käytettäväksi yhdessä kompressiohoidon kanssa

Tuotteen koostumus:

- ulkokalvo on höyryä läpäisevä, mutta bakteereja torjuva ja vesitiivis
- pois sulkeva kerros
- imukykyinen polyuretaanivaahto
- rei'itetty silikonikiinnitys
- turkoosit suojakalvot

Jos saat epäillyn allergisen reaktion tai jonkin muun sivuvaikutuksen, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Steriloitu etyleenioksidilla (EO).

Coloplast ei ota vastuuta loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi sattua, jos tuotetta käytetään Coloplastin voimassa olevien suositusten vastaisesti.

Säilytys

Suojattava suoralta auringonvalolta.

Käyttöohje**Valmistelu**

Puhdista haava ja haavaa ympäröivä iho paikallisten ohjeiden mukaisesti, esim. haalealla vedellä tai fysiologisella keittosuolaliuoksella.


Kuivaa haavaa ympäröivä iho hellävaraisesti.

Jos käytät kalvoa, emulsiovoidetta, voidetta tai vastaavaa tuotetta, anna haavaa ympäröivän ihon kuivua ennen tuotteen asettamista.

Asettaminen


Valitse tuote, jonka vaahto ulottuu haavan reunan yli noin 1-2 senttimetriä.

Avaa pussi ja poista tuote pakkauksesta.

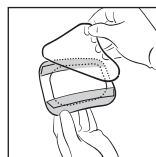

Suojakalvojen käytöllä voidaan estää liimapuoleen koskettaminen ja varmistaa aseptinen asettaminen.

Irrota keskiosan suojakalvo.

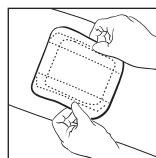

Aseta liimapuoli haavaan päin.



Irrota jäljellä olevat suojakalvot yksi kerrallaan.

Kuljeta varovasti sormiasi tuotteen reunan ympäri, jotta voit varmistaa tasaisen ja sileän asetuksen iholle.

Poistaminen

Tuote on vaihdettava, kun erite yltää lähelle vaahton reunaa vaahto-osan reunaa tai 7 päivän kuluttua.

Löysennä vaahtosidoksen rajapintaa ennen kuin nostat tuotteen varovasti irti haavasta ja poistat tuotteen. Jos tuotetta on vaikea poistaa, se on kostutettava vedellä tai fysiologisella suolaliuoksella, kunnes se irtoaa helposti.

Hävittäminen

Tuote on tarkoitettu vain kertakäyttöön, ja se on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti esim. normaalin talousjätteen mukana.

Älä huuhtelee tuotetta alas WC:stä.

Vaaratilanteista ilmoittaminen

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena tapahtuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja kansallisille viranomaisille.

Symbolien merkitykset



Lääkinnällinen laite



Osoittaa, että tuote noudattaa Euroopan lääkitieteellisiä laitteita koskevaa lainsäädäntöä



Luettelonumero



Viimeinen käyttöpäivä (VVVV-KK-PP)



Eräkoodi



Valmistuspäivämäärä (VVVV-KK-PP)



Valmistaja



Lue käyttöohje



Ei saa käyttää uudelleen



Steriloitu etyleenioksidilla



Yksittäinen steriili suojajärjestelmä



Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia



Älä käytä jos pakkaus on vaurioitunut ja lue käyttöohjeet ennen käyttöä



Osoittaa merkinnän, joka sisältää yksilöllisen laitetunnisteen



(Global Trade Item Number) GTIN-koodi



Suojattava suoralta auringonvalolta



Kierrätettävä pakkausmateriaali



Imukyky