

# Physiodose

## NASENREINIGER FÜR BABYS

Bestandteile (siehe Abbildung in mehrsprachiger Packungsbeilage):

1. Nasenaufsatz
2. Wattebausch (nicht enthalten)
3. Behälter
4. Rohraufsatz
5. Rohr
6. Mundaufsatz

### WARUM SOLLTE MAN EINEN NASENREINIGER VERWENDEN?

Bis zum Alter von 1 Jahr atmen Babys ausschließlich durch die Nase, und sie können sich selbst noch nicht die Nase putzen.

Wenn Nasenschleim die Nase des Babys verstopft, wird seine Atmung erschwert. Durch Absaugung des Nasenschleimes sorgen Sie dafür, dass der Schleim aus der Nase des Babys entfernt wird.

Im Schlaf oder beim Trinken kann Ihr Baby wieder viel besser atmen.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

#### Vorbereitung des Nasenreinigers für Babys

- 1 **Waschen Sie Ihre Hände.**
- 2 Setzen Sie den **PHYSIODOSE Nasenreiniger für Babys** gemäß der Abbildung zusammen.
- 3 Geben Sie einen Wattebausch, der als Filter dient, zwischen Nasenaufsatz und Behälter.

#### Bereiten Sie Ihr Baby vor

- Legen Sie das Kind auf den Wickeltisch und heben Sie seinen Kopf.
- Geben Sie den Mundaufsatz in Ihren Mund. Mit Hilfe des kleinen Randes können Sie den Aufsatz zwischen den Zähnen halten.
- Geben Sie den Nasenaufsatz in eines der Nasenlöcher Ihres Babys.
- Saugen Sie vorsichtig. Der Nasenschleim wird sich im Behälter sammeln.
- Wiederholen Sie den Vorgang so oft dies nötig ist.
- Reinigen Sie auch das andere Nasenloch.

Das Einträufeln einer physiologischen Kochsalzlösung oder einer verdünnten isotonischen Meerwasserlösung in jedes Nasenloch erleichtert die Absaugung des Nasenschleims.

#### PFLEGEEMPFEHLUNGEN

- Sie müssen den Nasenreiniger nach jeder Verwendung zerlegen, sorgfältig mit einer warmen Seifenlösung reinigen und anschließend mit klarem Wasser spülen.
- Sie müssen den Nasenaufsatz vor jeder Verwendung - für eine maximale Hygiene - immer kalt oder unter Dampf sterilisieren.

#### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ERSTE VERWENDUNG

- Zerlegen Sie den Nasenreiniger und reinigen Sie ihn mit einer warmen Seifenlösung, spülen Sie danach mit klarem Wasser.
- Sterilisieren Sie den Nasenaufsatz, den Sie verwenden, kalt oder mit Dampf.

#### WARNHINWEISE

Nicht auskochen.

**FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH UND AUSSER SICHTWEITE AUFBEWAHREN**