



# FUTURO™ CUSTOM DIAL KNIE-SPANGE ANPASSBAR

09190DABI



HOHER  
STÜTZGRAD



**Einstellrad ermöglicht einfach anpassbaren, punktgenauen Druck auf das schmerzende Knie.**

**IDEAL FÜR:**  
Tendinitis am Knie, Springerknie

## EIGENSCHAFTEN:


- 1 Einstellrad ermöglicht einfaches Erhöhen oder Verringern des Drucks.
  - 2 Anpassbarer Klettverschluss für individuelle Passform.
- Kissen übt gezielten Druck auf die Sehne aus, ohne dabei den Druck auf das Bein insgesamt zu erhöhen.

## GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
09190DABI	4440693	31.8-44.5




## TRAGEANWEISUNG:

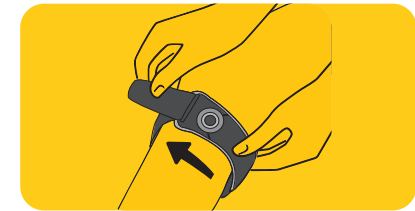

1a. Ziehen Sie den Klettverschluss durch den Schlitz, sodass eine Schlaufe entsteht. Positionieren Sie die Spange unterhalb des Kniegelenks.

1b. Das Druckpolster sollte gegen die Sehne gerichtet sein.

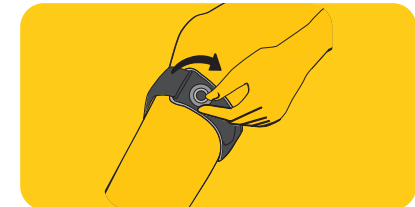

2a. Spannen Sie die Bandage auf eine angenehme, leichte Kompression und schließen Sie das Band. Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Kompression erreicht ist.

2b. Stellen Sie das Einstellrad so ein, dass der Druck je nach Aktivitätsgrad erhöht oder verringert werden kann; ziehen Sie es nicht zu fest an.

Zum Abnehmen lösen Sie das Einstellrad, bis der Druck genommen ist, haken das Band aus und schieben die Spange vom Unterschenkel.

Verwendungszweck: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Knien.

Zusammensetzung: Polycarbonat, Nylon, Polyurethan, Polyester, Metall, SEBS, Polypropylen, Thermoplastisches Elastomer.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M Österreich GmbH  
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J  
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien  
www.futuro.de

